

ワイヤレスカメラ付き電子耳かき クイックガイド

MR-EPWEP-BK

MR-EPWEP-GN

MR-EPWEP-RD

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
クイックガイドをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

付属品



①本体×1、
イヤースプーンケース×1



②イヤースプーン×8



③綿棒×3



④耳かき用梵天×2



⑤イヤープラグ×1



⑥USBケーブル×1




⑦クイックガイド

使用方法動画こちらをご覧ください

<https://youtu.be/ys7Wzve4VSU>



各部名称

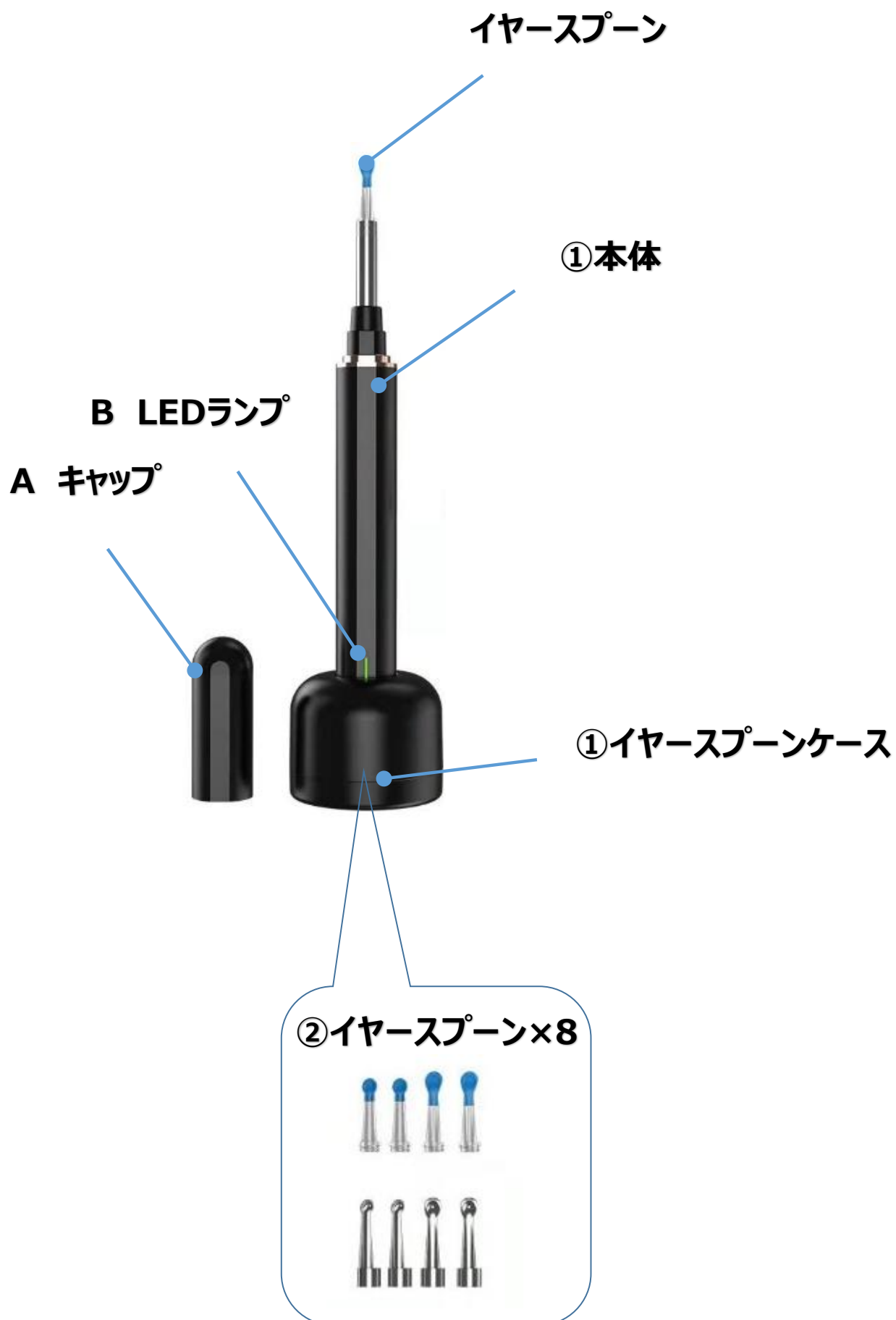

使用方法

1

スマホでQRコードを読み取って「 Walfront 」のアプリをインストールしてください。

iOS

<https://apps.apple.com/jp/app/walfront/id1525487564>




Android


<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chomp.earstick&hl=ja&gl=US>



キャップを外すと電源ONになります。

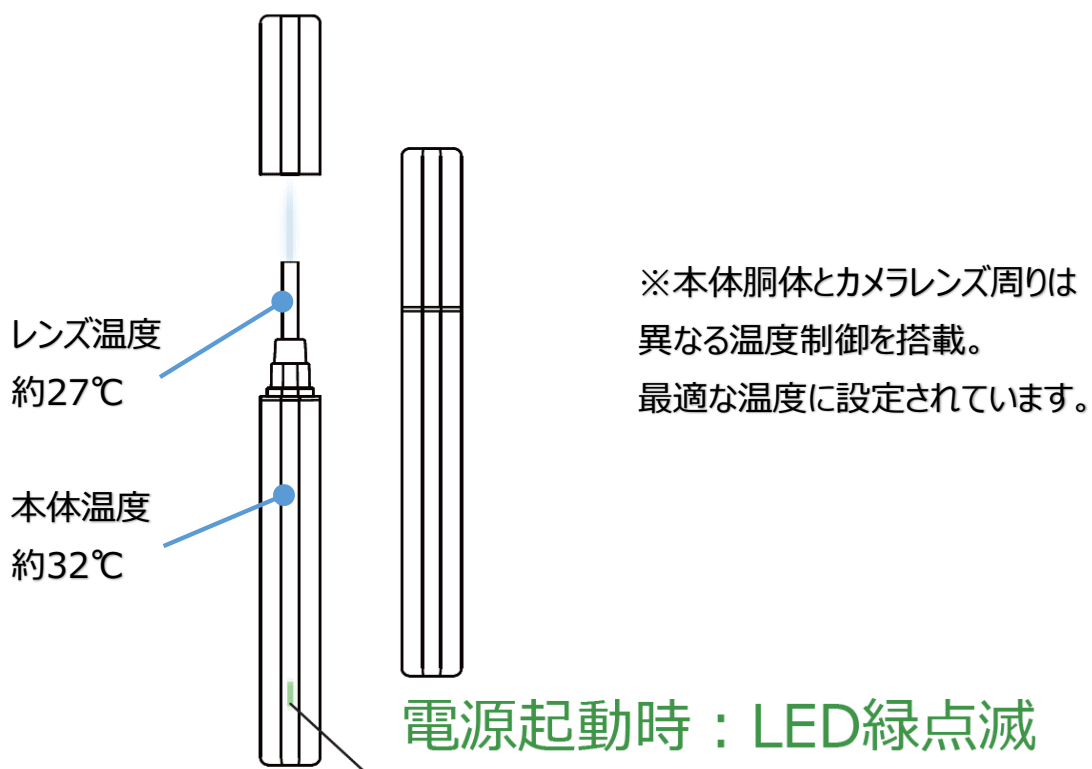


使用時、イヤースプーンをネジのように回転してしっかり固定したことを確認してご使用ください。

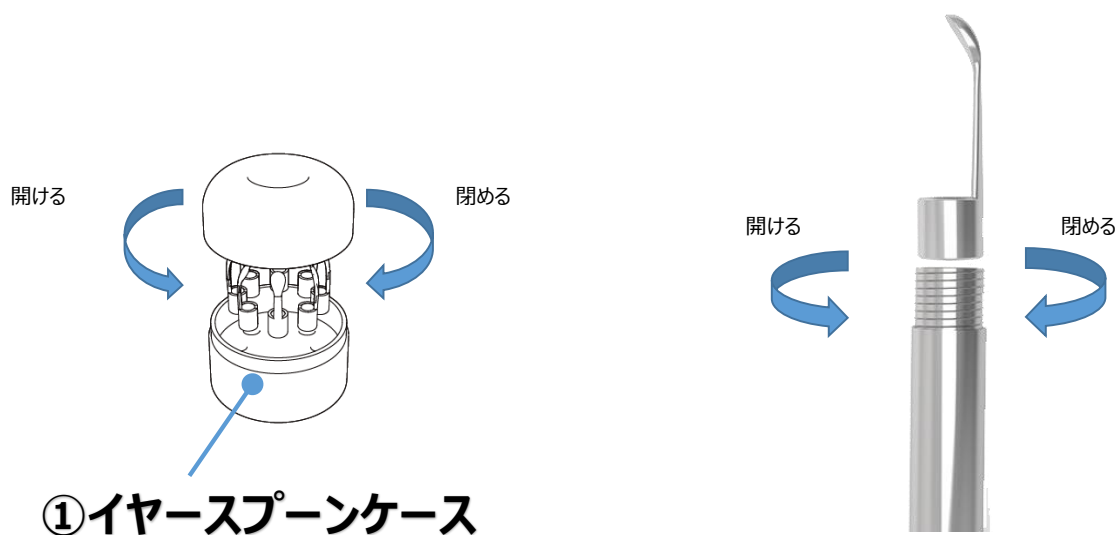

スマホと本機をWi-Fiで接続してください。

WiFi : walfront-xxxxxxxと接続してください。

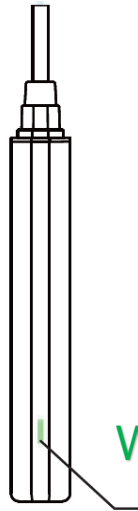


Wi-Fi接続時：LEDランプ緑点灯

アプリ画面で「始める」をクリックしてください。




6

アプリで映像を見ながら耳掃除してください。

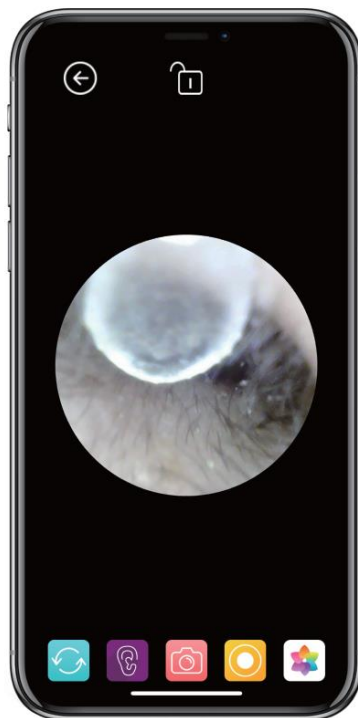


7

誤操作防止のため、スマホ画面の操作をロックできます。

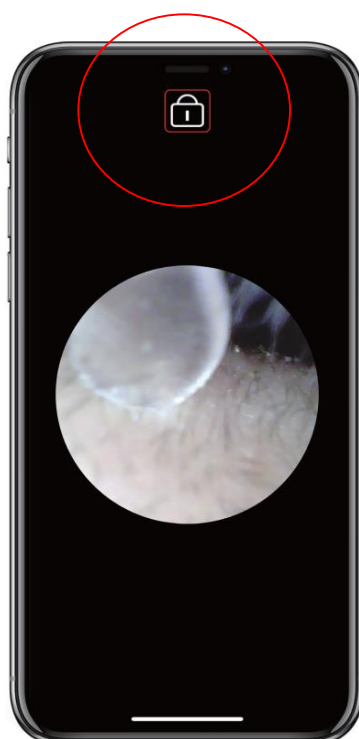

電池が少ない

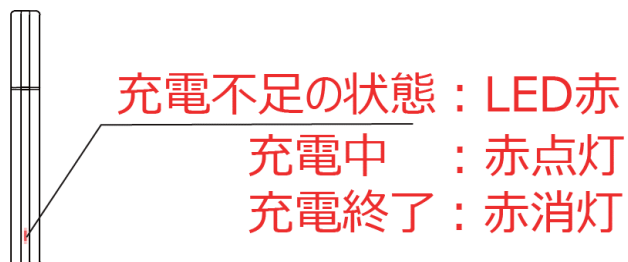

注意：iPhoneとペアリングする場合、画面にWi-Fiマークは表示されません。


※5V/1A出力対応「USBチャージャー」を別途ご用意ください。

※PDチャージャー対応しません。


イヤープラグは外耳道の深さに合わせて調整可能です。
深く入れてしまい傷つけることを防ぎます。



お子様の耳掃除をする場合、必ず保護者同伴で
ご使用ください。怪我や事故など危険な恐れがあります。

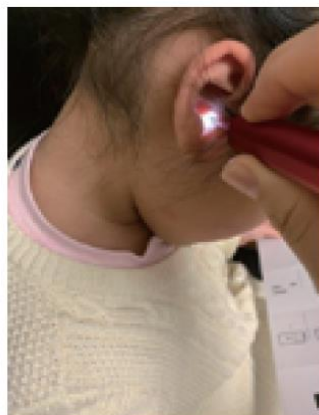

製品仕様

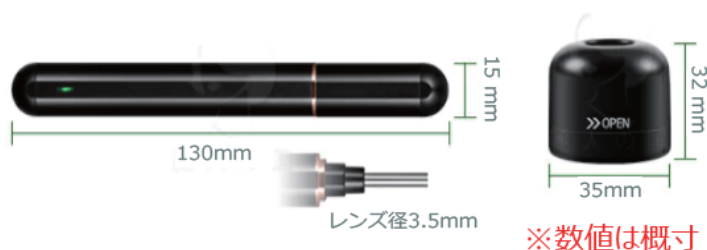

仕 様	
本体サイズ	1.5 x 13cm
台座サイズ	3.5 x 3.2cm
レンズ径	3.5 mm
ベストフォーカス位置	1.3~1.8 cm
本体重量	26g
バッテリー	300mAh リチウムバッテリー
画素数	300万
ランプビーズ	LEDランプ6個
防水	IP67
本体素材	アルミニウム合金
本体充電時間	60分間
作動時間	60分間
ジャイロ	6軸
作業できる温度	-10~50℃
対応OS	iOS and Android
フレームレート	25fps
映像素子	CMOS
入力電流	DC 5V 300mA

よくある質問

起動しても反応しない	・付属ケーブルで約 1 時間充電してください。 ・カバーを被せてもう 1 度外して電源の再起動。
アプリエラー	アプリをアンインストールで削除してから、再度インストールしてください。
ランプの点滅	電力不足です。 付属ケーブルで約 1 時間充電してください。
ペアリングしても動かない (フリーズ、反応しない)	・接続したペアリングを解除してから、再度接続してください。(電波状況の良い場所で使用) ・モバイル通信をOFFにしてWI-FIだけの設定してから、再度接続してください。
接続が途切れてしまう	本体を再起動し、再度ペアリングしてください。

注意事項

ご使用の前に、必ず注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項を守らずに使用した場合や、製造業者以外が修理、改造、再調整した場合、発生した事故に対しての一切の責任を負いかねます。

- 本商品は医療機器ではありません。
- 耳の中を傷つけないように使用してください。
- 本製品を6歳以下の子供に使用させないでください。
- カメラ、イヤースプーンは防水対応ですが、本体は防水ではございません。
- 本製品を使用する前に、必ずイヤースプーンをしっかりと取り付けてください。
- レンズを清掃したい場合、付属の綿棒で清掃してください。
- ペットの耳掃除にお使いいただく場合、イヤースプーンを必ず交換してください。
- 本製品を火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- 本製品を投げたり、衝撃を与えないでください。
- 充電中、熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならびに充電、保管はしないでください。

※注意: 画像はイメージです。実物とデザイン、色など異なる場合がございます。

※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。これは欠品ではありませんので予めご了承ください。

保証規定

- **保証期間は新品購入日から3ヶ月です。**
- サポートサービスは「ご購入日を確認できるレシートや購入証明書」が必要です。大切に保管してください。
- 転売品など所有権譲渡品、中古売買品は理由を問わず保証対象外となります。
- 保証期間内にクイックガイドの注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に無償対応いたします。
- 本製品の保証は日本国内のみ有効です。The warranty of this product is valid only in Japan.
- 点検依頼中の代替品の貸出は行っておりません。
- 以下の場合には保証対象外になります。
 1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障および損傷。
 2. ご購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障および損傷。
 3. 当社の指定サービス機関以外で行われた修理、改造、分解による故障および損傷。
 4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害（自然災害を含む）、結露、環境要因に起因する電圧の変化など。
 5. 保管の不備（高温多湿、防虫剤や有害薬品など影響下の保管等）や手入れの不備（本体内部に砂やほこり、液体など異物混入）による故障および損傷。
 6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷。
 7. 本書の提示が無い場合又は未記入、改ざんが認められた場合。
 8. 付属品や消耗品類の交換。
 9. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示が無い場合。
- 不具合の疑いがある場合（点検、初期不良）
- 不具合の疑いがある場合、弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご依頼にあたり、お客様のご連絡先、故障状況など明記の上、ご購入日を確認できるレシートなどを添付してメールをお送りください。
- **製品の初期不良期間は購入日から2週間以内です。**そのため、ご購入後速やかに動作確認をお願いいたします。

■ 返送時の送料について

1) 初期不良扱い（購入後2週間以内）

「日本郵便 ゆうパック」着払い、または他の運送業者をご利用される場合は元払いで発送してください。

2) 修理点検扱い（購入後2週間以上）

お客様の元払いにてお送りください。

※ 下記に該当する場合、受け取りをお断りする場合がございますので予めご了承ください。

- ・事前に連絡ない場合。
- ・指定業者以外での着払い。
- ・初期不良扱いを過ぎている場合の着払い。

サポート

当社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万が一ご不便やご不都合などお気づきの点がありましたらサポート宛てにメールでご連絡ください。

お問い合わせ：miraion@miraion.jp

販売元：ミスターカード株式会社

20211102