

温度はかるさん2 シリーズ クイックガイド

MR-KPCAT2-AL
MR-KPCAT2-SETA
MR-KPCAT2-SETB

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
クイックガイドをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

付属品




※三脚スタンド
使用時に利用



※家庭用コンセントに接続するUSBチャージャーは付属して
おりません。別途、5V/2A出力対応の「USBチャージャー」
をご用意ください。
※①のノズル、②USBケーブル、③黒いトレイなど消耗品扱いと
なります。腐食など発生した場合にはスเปアパーツをサポート
センターへお問合せください。

各部説明

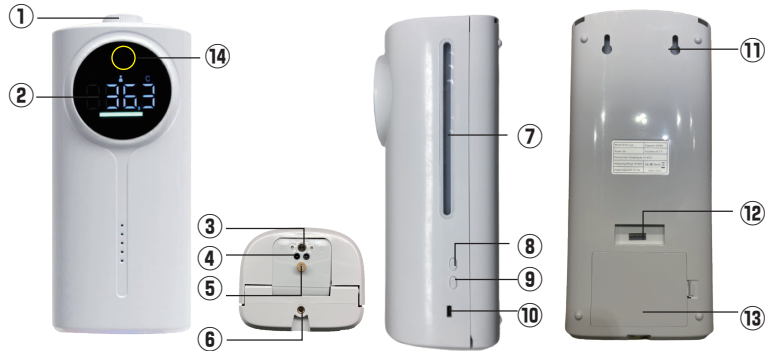

部位	名称
①	キャップ
②	モニター
③	赤外線温度センサー
④	距離センサー※
⑤	消毒液出口
⑥	三脚取付穴
⑦	消毒液残量確認窓
⑧	電源ボタン
⑨	設定ボタン
⑩	USBポート
⑪	壁掛け用穴
⑫	卓上スタンド用穴
⑬	電池カバー
⑭	赤外線温度センサー

※距離センサーについて
・本体下側から約15cm以内に物を置かないでください。
・本体下側に付属のトレイまたは「黒色の受け皿」を必ずご利用ください。
・手のひらを検知する感度センサーは「黒以外の色」に反応するため、
アルコールを連続噴射してしまう場合があります。



オンラインクイックガイド

設置方法

1.壁掛け 2.卓上スタンド 3.スタンド 4.三脚スタンド



温度はかるさん2
スタンド
オンラインクイックガイド



温度はかるさん2最新情報
は製品のウェブページ、
またはQRコードから
ご確認ください。

⑥固定補助部品について

1) 卓上スタンドに取付ける場合



2) 三脚スタンドに取付ける場合




ご使用前の準備

1.必ず動作確認を行ってからご使用ください。

本体を使用場所（15～40℃の環境下）に30分以上置いて室温になじませてから測定してください。

※「10℃以下の場所」「夜間冷えた状態」「高温の状態」ではうまく動かない場合がございますが、製品の動作温度仕様のため
不具合ではございません。

2.消毒液を補充

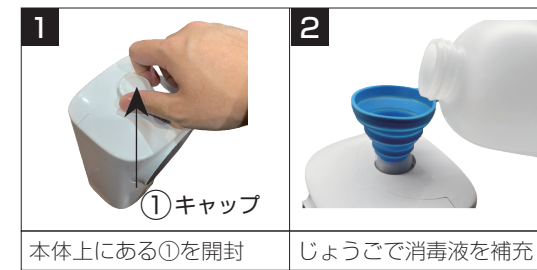

【必ずお読みください】

※消毒液を補充する際、タンク外に漏れると故障の原因になります。必ずじょうごをご使用ください。

※本体を傾けたり逆さまにするとタンクの液体がこぼれます。
液体が本体内部に入ると故障の原因となり、保証対象外
となります。

※本製品は液体アルコールの消毒液専用です。
ジェルの消毒液は絶対に使用しないでください。

3.電源の接続


USBケーブル



本体⑩へ接続して、電源ボタンを押すと
電源オン。
※力チッと音がするまで押し込む。

おすすめ！
コスト
軽減！

乾電池（推奨：アルカリ乾電池）

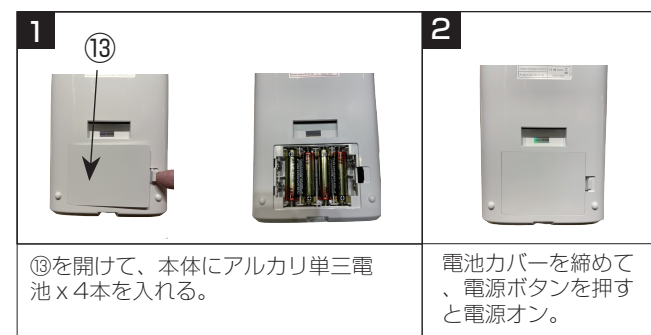

電池カバーを締めて、
電源ボタンを押すと
電源オン。

※乾電池とUSBケーブルの併用せず、どちらかを選んでご利用ください。
※アルカリ乾電池（単三型）をおすすめします。

使用方法



電源を入れると、待機モードになり、LEDラン
プが順番に点灯します。



2

①

②

②モニター

①手のひらを本体の下部分に入れると温度測定と消毒液が噴射します。

②手のひらを本体の上部分に触れると温度測定のみ行います。

動作しない場合、手を引いてもう1度お試しください。

測定結果

アラーム設定時

正常温度 (37.2℃以下)	高温 (37.3℃～警告温度)	超高温 (警告温度～41.9℃)	異常温度 (42.0℃以上)
36.5 ピッ	38.0 ピピ	39.0 ピピピ	42.0
アラームとLED(緑) 点滅	アラームとLED(黄) 点滅	アラームLED (赤) 点滅	表示が「Hi」

音声設定時

正常温度 (37.2℃以下)	高温 (37.3℃～警告温度)	超高温 (警告温度～41.9℃)	異常温度 (42.0℃以上)
36.5 体温正常	38.0 体温が高い	39.0 体温が超高い	42.0 ビビビ
体温正常	体温が高い	体温が超高い	

温度が低すぎる場合



寒い時期、手が冷えた状態で温度測定を行うと 低い温度表示になってしまいます。手を擦るなど 手を温めた状態で再度測定してください。

機能設定



モードを押してA～Gを切替
詳細を押して設定を行う。
00.0で測定に戻ります。

モード	詳細	初期設定
A 温度表示	℃ / °F	℃ (日本)
B 測定モード選択	bOd、COU、Sur	bOd
C 警告温度	37.3～39.0 (℃) の範囲で設定	37.5
D 音量	U0～U4 5段階	U0
E アラーム/音声	OFF (アラーム) CN (中国語) En (英語) Es (スペイン語) JP (日本語) その他言語に切り替わり	OFF
F 噴射量	E0.1～E2.0 20段階	E0.5
G 測定モード	「00.0」が表示されて設定終了 測定の待機モードに戻ります	

ノズルクリーニング



ノズルの詰まりを円滑にし、月1-2回クリーニングしてください。
ボタン2つ同時長押しと、10秒間連続噴射します。


※ノズル詰まりを解消できない場合はノズル破損の疑いがございます。

よくあるご質問

Q：表面温度が低く表示される。
A：下記の2点をご確認ください。
①寒い時期、手が冷えた状態で温度測定を行うと低い温度になる場合がございます。手が温まった状態になってから再度測定してください。
②測定モードの確認
表面温度の測定は、測定モードは「bOd」をご使用ください。

Q：動作が不安定（噴射量が少ない。表示時間が短い。表示が点滅する。）
A：電力不足の疑い 乾電池の電池切れ、または乾電池が冷えすぎてパフォーマンスが低下した可能性があります。付属ケーブルとスマホ充電器のUSB接続または電池交換で一度動作確認を行っていただけますでしょうか。

使用上のご注意

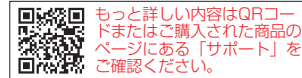

ご使用の前に、必ず 注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項を守らずに使用した場合や、製造業者以外が修理、改造、再調整した場合、発生した事故に対しての一切の責任を負いかねます。
※本製品は液体アルコールの消毒液専用です。ジェルの消毒液は絶対に使用しないでください。
※乾電池とUSBケーブル併用はしないでください。
※本製品は火気を絶対に近づけないでください。
※本機は表面温度を測定する製品です。医療用の温度計ではありません。以下の場合は正しい温度を表示できない場合がありますためご注意ください。<測定時のご注意：本体、手のひら>

- ・エアコンや暖房の近くなど風の当たる場所で測定した場合。
- ・直射日光など環境により温まっている場合。
- ・汗などで濡れている場合（手のひら）
- ・測定する場所とは異なる温度差のある場所にいた場合。
- ・測定の妨げになるものがセンサーの間にある場合。
- ・指定の使用温度、湿度範囲外で使用しない。
- ・上記の場合、正しい測定精度を保証できません。
- 測定について
- ・温度測定は手の平で行ってください。
- ・手のひら以外の場所で測定すると正確に測定できない場合があります。
- 取扱いについて
- ・お子様だけの使用や、幼児の手の届く所に保管しないでください。ケガの恐れがあります。
- ・落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ・分解・修理・改造を行わないでください。故障や誤作動の原因になります。
- ・本体に動作に異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・本製品を廃棄する場合は、各自治体の規則に従い適切に処分する。
- ・本製品は防水仕様設計ではありません。

動物おめんの使い方

- 1 両面テープをご用意いただき、点々の空白部分に貼りつける。
- 2 本体に両面テープで貼りつければ完成。



楽しく検温、消毒できる！

保証規定

- ・保証期間は新品購入日から6ヶ月です。転売品など所有権譲渡品、中古売買品は理由を問わず保証対象外となります。
- ・保証期間内のサポートサービスには「ご購入日を確認できるレシートなどの証明書」が必要なため大切に保管してください。
- ・保証期間内にクイックガイドの注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に無償対応いたします。
- ・本製品の保証は日本国内のみ有効です。The warranty of this product is valid only in Japan.
- ・点検依頼中の代替品の貸出は行っておりません。
- ・以下の場合には保証対象外になります。
 1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障および損傷
 2. ご購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障および損傷
 3. 消毒液が漏れ発生した故障は保証対象外となりますので予めご了承ください。
 4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害によるもの（自然災害を含む）、結露、環境要因に起因する電圧の変化など
 5. 保管の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等）や手入れの不備（本体内部に砂やほこり、液体など異物混入）による故障および損傷
 6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷
 7. 本書の提示が無い場合又は未記入、改ざんがに止められた場合
 8. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示が無い場合

※注意：画像はイメージです。実物とデザイン、色など異なる場合がございます。
※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。これは欠品ではありませんので予めご了承ください。

サポート

- 初期不良について
- ・製品の初期不良期間は購入日から2週間以内です。そのため、ご購入後速やかに動作確認をお願いいたします。
- ・不具合の疑いやおかしいなと思った時、依頼品発送前にサポートセンターへお問い合わせいただけますでしょうか。
- 返送時の送料について
- 1) 初期不良扱い（購入後2週間以内）
「日本郵便ゆうパック」着払いにてお送りください。別の運送業者の場合は、元払いで発送してください。
- 2) 修理点検扱い（購入後2週間以上）
元払いにてお送りください。
- ※下記に該当する場合、受け取りをお断りする場合がございますので予めご了承ください。
 - ・事前連絡ない場合
 - ・指定業者以外での着払い
 - ・初期不良扱いを過ぎている場合の着払い

ご使用法について、万一ご不明な点や不具合などお気づきの点がありましたら、サポート宛てにメールでご連絡ください。
お問い合わせ： miraion@miraion.jp
販売元: ミスターカード株式会社