

充電スタンド式 ワイヤレスカメラ電子耳かき 取扱説明書



このたびは、弊社製品をご購入いただき誠に
ありがとうございました。
本製品を安全に正しくお使いいただくため、重要な
情報が記載されています。この取扱説明書を
よくお読みのうえ、正しく使用してください。
誤った使用は故障や事故、けがなどの原因となります。

同梱品




イヤークリーナー本体
(ソフトスプーン付き)



イヤースプーン
収納ケース



USBケーブル
(USB-A to Type-C)

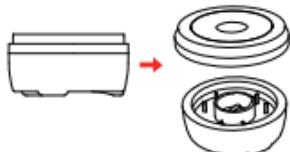

台座Type-C
充電スタンド

3種類のイヤースプーン付属



小サイズさじ型
スプーン X2本



大サイズさじ型
スプーン X2本



L字型スプーン
X2本

キャップの交換方法

ソフトタイプのキャップをはずして
予備キャップを入れてください。



ソフトキャップが脱着する可能性があるため、使用する前にキャップ
が抜けにくいことを確認ください。使用中に強く使ってしまうとソフト
キャップが外れるためご注意ください。

各部名称



上部:LEDランプ
下部:Type-Cコネクタ



電源ボタン



収納キャップ

アイコンの説明



戻る



アルバム：製品で撮影した
画像や動画を確認できます。



アイコン表示
/非表示




右耳モード(正転)と
左耳モード(反転)を切り替え



通常表示方法



写真を撮影(アルバムに保存)

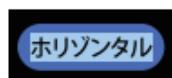

水平固定式
表示方法



ボタン1つで撮影開始、撮影
終了縦画面、横画面の切り替え



動画を撮影
(アルバムに
保存)



充電不足の表示：
バッテリー残量不足のため
本体を充電してください。

ア ル バ ム

- 写真、動画のデータを保存
- タップすると再生・表示
- 削除方法：編集 → 写真/動画 → 選択(一部/すべて)
→ ゴミ箱をタップ
- SNS共有：編集 → 写真/動画 → 選択(一部/すべて)
→ SNSをタップ

充電方法

●同梱品のUSBケーブルを使って、充電してください。

Type-C コネクタ：台座（本体）へ接続

USB-A コネクタ：充電アダプタ（別売）に接続

充電時間は約60分

●充電のLEDパターン

電池残量少：LED（赤）点滅

充電中：LED（赤）点灯

充電完了時：LED（青）点灯または消灯

※バージョンにより異なる場合あり

※5V/1A対応の充電器アダプタを別途ご用意ください。

PD充電器では充電できません。

※電源オンの状態で、本体を充電及び使用しないでください。

※電源オンしたままで、約5分間で自動電源オフになる

よくある質問と解決方法

Q：動かない

A：下記をご確認ください。

① Wi-Fi接続

- ・スマホと耳かきを直接Wi-Fiで接続してください。
- ・ご家庭のWi-Fiルーターには接続しません。
- ・ご使用時にインターネットは接続しません。

② フル充電

- ・スタンダードなUSBアダプタ（5V/1A）で充電する。
- ・PD充電やパソコンのUSBでは充電できません。

③ その他

- ・アプリを再インストールしてください。
- ・スマホを再起動（電源オフ→オン）してください。
- ・Wi-Fi（オフ→オン→AiSeexxxxを接続）を試す。

スマートフォンiOSアプリ初期接続手順

本製品はスマートフォンと連携して使用する、
ワイヤレスカメラ電子耳かきです。ご使用前に専用
アプリをインストールしてください。ダウンロード後は
スマートフォンと本製品のWi-Fi接続を有効にし、
スマートフォンで設定アイコンを選択してください。
Wi-FiのAiSee-xxxxを選択し、スマートフォンと
連動して下さい。

※この手順書は参考画面です。iOSのバージョンにより
画面の表示は変わる場合がありますのであらか
じめご了承ください。

本製品は「スマホ」と「ワイヤレスカメラ電子耳かき」を
WiFiで接続して使います。
ご使用時にインターネット接続は不要です。



1



電源ボタンを長押し(約3秒)、
本体上部ヘッド部分と
WiFiの接続状態のランプが
点灯／点滅します。

2



アプリ「AiSee Pro」
のダウンロード

3

AiSee Pro

iOS



>

Android(Google)

>

Android(Chinese)

>

Android(応用宝)

>

4



AiSee_Pro

ユーティリティ

入手



20件の評価

2.5

★★★☆☆

年齢

4+

歳

ランク

#156

ユーティリテ

アップデート

バージョン履歴

バージョン 1.0.46

4か月前

5



AiSee_Pro
ユーティリティ

開く



&

20件の評価

2.5

★★★☆☆

年齢

4+

歳

ランク

#156

ユーティリテ

アップデート

バージョン履歴

バージョン 1.0.46

4か月前

6



製品接続?



7

...? 製品接続?



"AiSee Pro"がローカル
ネットワーク上の
デバイスの検索および
接続を求めています
このアプリで、使用中のネット
ワーク上のデバイスの検
索および接続ができるよう
になります。

許可しない

許可



8

リマインダー

設定-Aisee Pro-ローカルネットワーク
オプションでローカルネットワークへの
アクセスを許可してください

無視

「設定」に進む



9



10




11




12




13

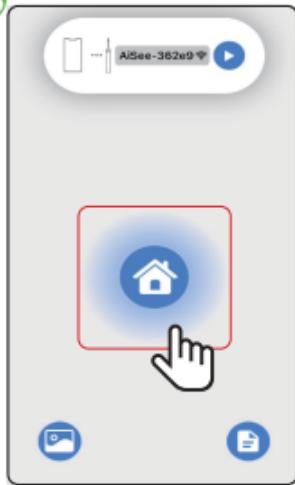

14

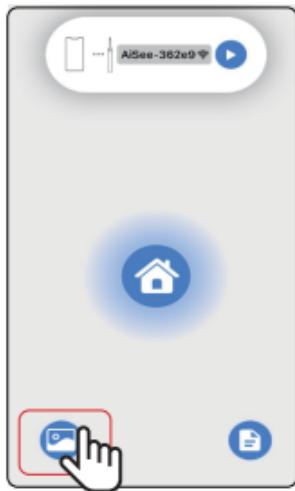

15

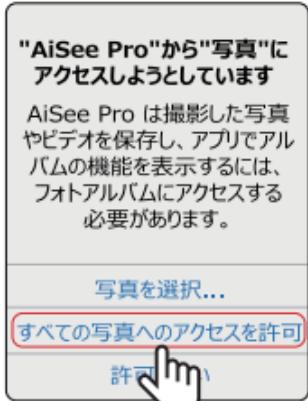

権限エラーの画面が出た場合、許可する(はい)を選択してください。解決しない場合、スマートフォン本体側の設定画面で「写真と動画(ストレージ)」を許可(オン)してください。

スマートフォンAndroidアプリ初期接続手順

本製品はスマートフォンと連携して使用する、ワイヤレスカメラ電子耳かきです。ご使用前に専用アプリをインストールしてください。ダウンロード後はスマートフォンと本製品のWi-Fi接続を有効にし、スマートフォンで設定アイコンを選択してください。Wi-FiのAiSee-xxxxを選択し、スマートフォンと連動して下さい。

※この手順書は参考画面です。Androidスマート

フォンはOSや機種ごとに言語や表示方法が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

本製品は「スマホ」と「ワイヤレスカメラ電子耳かき」を WiFiで接続して使います。
ご使用時にインターネット接続は不要です。



1

電源ボタンを長押し
(約3秒)、本体上部
ヘッド部分とWiFiの
接続状態のランプが
点灯／点滅します。



2

アプリ「AiSee Pro」
のダウンロード

3




4



5



6

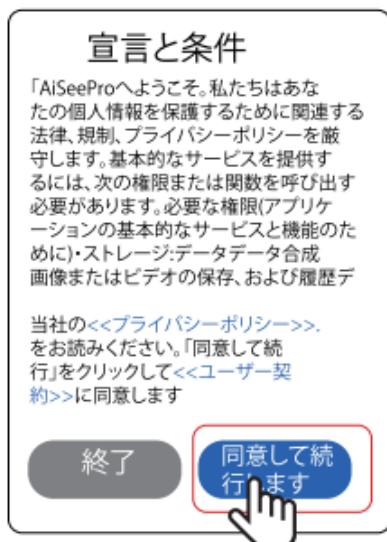

7



写真/ストレージのアクセス権限
を許可する

写真の撮影、記録、保存されたファイルの表示に使用できますが、拒否した場合は、再度使用するときにこれらの機能をオンにすることができます。

次のステップ



8



写真/ストレージのアクセス権限
を許可する

AISee Proに端末上のメディアへの
アクセスを許可しますか?

写真、ビデオ、オーディオが
含まれます。

許可



権限エラーの画面が出た場合、許可する(はい)を選択してください。解決しない場合、スマートフォン本体側の設定画面で「写真と動画(ストレージ)」を許可(オン)してください。

9



位置情報へのアクセスを許可する

より良い体験を実現するために、アプリは現在のWi-Fi名と接続デバイスの取得をしようとしても、それはあなたの位置情報の使用、保存、記録などはされません。ご安心して
許可してください。

次の二二二



10



この端末の位置情報へのアクセス
をAiSee Proに許可しますか?

正確な位置情報・オフ



使用時のみ許可

今回ののみ許可

折香

11



「Wi-Fi設定」画面に移して接続します

12



13



※ここで、スマホと連動イヤークリーナーの接続完了し、操作可能となります。

14



使用上のご注意

製品を安全にご利用いただくため、ご使用の前に以下の「安全上のご注意」をご確認ください。この取扱説明書では、お客様や周辺の方々への危害や財産への損害を未然に防止し製品を安全にお使いいただけるよう注意・警告の喚起をおこなっています。

禁 止

- 耳に異常のある場合は使用しない。
- 強い力で使用しないでください。
- 分解、改造は絶対におやめください。
- 強い衝撃や振動を与えない。
- 本体を水に濡らさない、濡れた手で使用しない。
- 直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所で使用、保管しない。
- クリーニングに有機溶剤を使用しない。

注 意

- 完全防水ではありません。
- 耳の奥に入れすぎない、耳の中を傷つけない。
- データの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- OSのバージョンアップによる不具合は保証対象外です。
- 本来の目的以外の使用はおやめください。

必 ず 行 う

- 熱、におい、異音など異常のある場合は直ちに使用を中止して、弊社へご連絡ください。
- 治療中の方は医師の指示に従って使用してください。
- 使用後異常を感じる方は医師の治療を受けてください。
- お子様の手の届かない場所で使用、保管してください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用されている方は医師に相談のうえご使用ください。

安全上のご注意

- 購入後、速やかに動作確認をおこなってください。
- ケーブルを抜くとき、必ずコネクタを持って外してください。
- バッテリーの特性により、満充電や電力ゼロの状態で
長期保管しないでください。約50%程度で保管してください。
- 過放電は寿命を縮め充電できなくなる可能性があります。
- 電池切れの前に充電をおこなってください。
- 充電回数の目安は約300回～500回です。
※使用回数や環境により異なります。
- 充電回数、動作時間に関わらず充電式バッテリーは保証対象外です。
- USB充電アダプタは付属しておりません。
別途USB充電アダプタ(5V/1A対応品)をご用意ください。
- 電波の影響が大きい場所では映像や音声が乱れて
記録される可能性もございます。

電波に関する注意事項

- 本製品に使用している無線装置は電波法に基づく2.4GHz帯高度化
小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を
受けています。本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用
機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の
構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局
(免許を要しない無線局)があります。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および
特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。
万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉
の事例が発生した場合には、速やかに使用を停止し、お客様相談
ホットラインにご連絡いただき、混信回避のための処置など
(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 本製品は日本国内のみ保証しています。

サポート

※画像はイメージです。実物とデザイン、色等異なる場合がございます。

※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく

一部同梱物内容を変更する場合があります。パッケージの記載
有無に問わず、欠品ではございませんのであらかじめご了承ください。弊社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万一ご不便やご不都合などお気づきの点がありましたらお客様相談ホットライン宛てにメールでご連絡ください。

お問い合わせ:miraion@miraion.jp

販売元:ミスタークード株式会社

サポート依頼の流れ　※返送時の送料

製品に不具合が生じた場合、ご購入の店舗または弊社
お客様相談ホットラインへお問い合わせください。

1. 初期不良の疑いがある場合、弊社お客様相談ホットラインへメール(miraion@miraion.jp)でご連絡ください。
2. 弊社お客様相談ホットラインで内容を確認したら、
ご返送方法をご案内いたします。
3. 確認のため依頼品をお預りし、症状確認したら速やかに
交換対応させていただきます。

※返送時の送料

【購入日から2週間以上】お客様の元払いでお送りください。

【購入日から2週間以内】指定便(日本郵便ゆうパック/佐川急便)
の着払いでお送りください。

指定便以外はお客様の元払いでお送りください。

※【ご注意!】下記①②③に該当する場合、受け入れをお断りする
場合がございますのであらかじめご了承ください。

- ①事前に連絡のない依頼品 ②指定業者以外の着払い
③初期不良期間を過ぎている依頼品の着払い

保証規定

この取扱説明書には事故防止のため重要な注意事項と取扱方法を記載しておりますので、よくお読みいただき製品を安全にご使用ください。

保証期間：新品購入日から6ヶ月間以内（初期不良 2週間以内）

※消耗品扱いのため、修理はお受けしておりません。

- ・サポートサービスや初期不良対応には「購入日と販売店を確認できるレシートや購入証明書」が必要です。
大切に保管してください。
- ・初期不良対応の期間中に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に交換対応いたします。
- ・転売品など所有権譲渡品、中古売買品は理由を問わず保証対象外。
- ・本製品の保証は日本国内のみ有効です。

以下の場合には保証対象外になります。

1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障や損傷。
2. 購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障や損傷。
3. 弊社指定サービス機関以外でおこなった修理/改造/分解による故障や損傷。
4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害によるもの（自然災害を含む）、結露、環境要因に起因する電圧の変化など。
5. 保管の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管など）や手入れの不備（本体内部に砂やホコリ、液体など異物混入）による故障および損傷。
6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷。
7. 本書の提示がない場合または未記入、改ざんが認められた場合。
8. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示がない場合。