

スマホ不要 モニター付き多機能 イヤークリーナー

取扱説明書



家庭用



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、
本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製、転載することはおやめください。

※注意: 画像はイメージです。実物とデザイン、色など異なる場合がございます。
※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。これは欠品ではありませんので予めご了承ください。

※万一、足りないものがありましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

禁 止

- 耳に異常のある場合は使用しない。
- 強い力で使用しない。
- 分解、改造は絶対にしない。
- 強い衝撃や振動を与えない。
- 本体を水に濡らさない、濡れた手で使用しない。
- 直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所で使用、保管しない。
- クリーニングに有機溶剤を使用しない。
- 端子に水分、金属、燃焼するものなど異物を入れない。

注 意

- 本製品は防水設計ではありません。
- 耳の奥に入れすぎない、耳の中を傷つけない。
- データの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本来の目的以外の使用はおやめください。


警 告

- 熱い、異音など異常のある場合は直ちに使用を中止して、弊社へご連絡ください。
- 接続機器の正しい使用方法を確認してご使用ください。
- 使用前、接続機器のデータバックアップをおこなってください。
- 治療中の方は医師の指示に従って使用してください。
- 使用後異常を感じる方は医師の治療を受けてください。
- お子様の手の届かない場所で使用、保管してください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用されている方は医師に相談のうえご使用ください。


安全上のご注意

- 購入後、速やかに動作確認をおこなってください。
- ケーブルを抜くとき、必ずコネクタを持って外してください。
- バッテリーの特性により、満充電や電力ゼロの状態でも長期保管しないでください。約50%程度で保管してください。
- 過放電は寿命を縮め充電できなくなる可能性があります。
- 電池切れの前に充電をおこなってください。
- 充電回数の目安は約300回～500回です。
※使用回数や環境により異なります。
- 充電回数、動作時間に関わらず充電式/バッテリーは保証対象外です。
- USB充電アダプタは付属していません。
別途 USB充電アダプタ (5V/1A対応品) をご用意ください。


各部名称 & ボタン操作

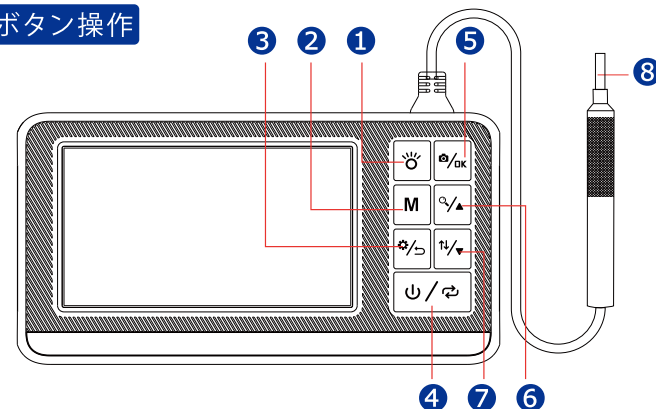

- 1** **明るさ調整 (LEDライト)**
明るさ3段階調整 (Led 1/2/3)
※Led0は消灯
- 2** **M 再生**
ビューアー画面へ移動/終了 (**2** ボタン)
動画を再生/終了 (**5** ボタン)
削除と保護/終了 (**3** ボタン)
カーソル上移動 (**6** ボタン)
カーソル下移動 (**7** ボタン)
OKボタン (**5** ボタン)
- 3** **設定画面/戻る**
設定画面/終了 (**3** ボタン)
OKボタン (**5** ボタン)
戻る (**3** ボタン)
カーソル上移動 (**6** ボタン)
カーソル下移動 (**7** ボタン)
- 4** **電源**
電源ON/OFF (**4** 長押し)
- 5** **静止画撮影、動画撮影**
写真撮影: 撮影 (**6** ボタン)
動画撮影: 録画開始 (**5** 長押し)
録画終了 (**5** ボタン)
- 6** **画面拡大 (3段階) / 移動**
画面拡大3段階 (**6** ボタン)
※他の機能ではカーソル上移動
- 7** **画面上下反転/移動ボタン**
画面の上下反転/終了 (**7** ボタン)
※他の機能ではカーソル下移動
- 8** **カメラスコープ**

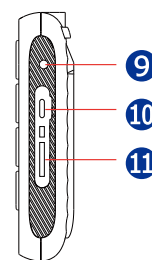


- 9** **充電インジケータライト**
充電中: 赤色LED点灯
充電完了: 消灯
- 10** **USB充電ポート**
- 11** **メモリーカードスロット**
microSDカード (Class10) UHS-Iを推奨
最大64GBまで対応

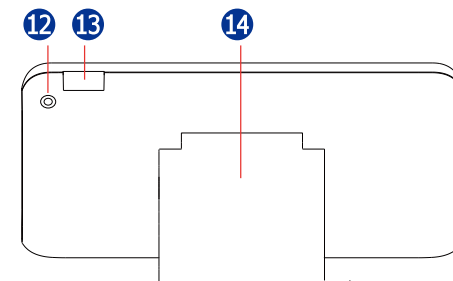


- 12** **カメラスコープのロック/解除ボタン**
- 13** **カメラスコープの接続ポート**
- 14** **スタンド**

同梱品

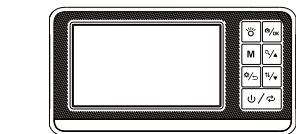

モニター本体

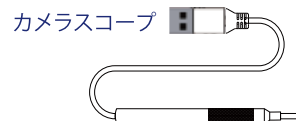

カメラスコープ



付属ケーブル
(USB Type-A to C)



専用ケース

イヤースプーン





小 X 2 中 X 3 大 X 3

耳観察用保護カバー



メモリーカード
32GB
(最大64GBまで対応)
クイックガイド

使用方法

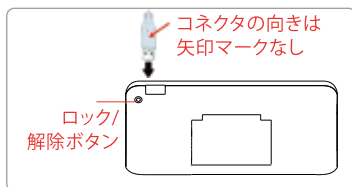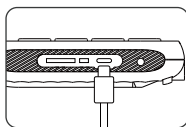

カメラスコープの接続方法


ロック/解除ボタンを押したまま
USB-Aのコネクタ側(凸)を本体側(凹)へ
カチッと音がするまで奥まで差し込んでください。

動画マニュアル



充電方法


付属ケーブルとUSBアダプタを用意して、
本体のUSB充電ポートに接続してください。
充電時間の目安は(約)2時間です。
※別途USB充電アダプタ(5V/1A対応品)を
ご用意ください。
充電中:赤色LED点灯 充電完了:消灯

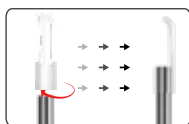

注意事項
必ず、使用する前にイヤースプーン
が固定されていることを確認
ください。耳の中で強く使って
しまうとイヤースプーンが
外れてしまうため
注意しながらご使用ください。

耳掃除

カメラスコープの先端にイヤース
プーンを装着してご使用ください。

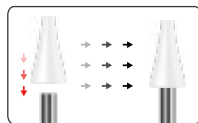

耳の中を確認する

安全のために、カメラスコープの
先端に保護カバーを装着して
ご使用ください。



カメラスコープの点を
上側にして、ご使用
ください。

ファイルのコピー

メモリーカードを利用するか、本体とパソコンをケーブルで接続してファイルのコピーをおこなってください。



付属ケーブル



パソコンに本体が認識されない場合は、再起動、
ケーブルの抜き差しなどお試しください。

設定メニュー

解像度	撮影する解像度(1920 x 1080、1280x720、640x480)
日付/時刻	日時の設定
Brightness	撮影する明るさ(4段階)
オートパワーオフ	オフ、1分、3分の設定
Memory	メモリーカード情報
フォーマット	メモリーカードのフォーマット
デフォルト設定	設定を購入時の状態に戻す
バージョン	システムのバージョン情報
表示言語	英語、中国語繁体/簡体、日本語、フランス語、ドイツ語、 韓国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語

保証規定

この取扱説明書には事故防止のため重要な注意事項と取扱方法を記載しておりますので、よくお読みいただき
製品を安全にご使用ください。

保証期間:新品購入日から6ヶ月以内(初期不良2週間以内)※消耗品扱いのため、修理はお受けしていません。

- サポートサービスや初期不良対応には「購入日と販売店を確認できるレシートや購入証明書」が必要です。
大切に保管してください。
- 初期不良対応の期間中に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に交換対応いたします。
- 転売品など所有権譲渡品、中古売品は理由を問わず保証対象外となります。
- 廃棄方法は各自治体の廃棄ルールに従って廃棄してください。
- 本製品の保証は日本国内のみ有効です。

以下の場合には保証対象外になります。

- 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障や損傷。
- 購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障や損傷。
- 弊社指定サービス機関以外でおこなった修理/改造/分解による故障や損傷。
- 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害によるもの(自然災害を含む)、結露、環境要因に起因する電圧の変化など。
- 保管の不備(高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管など)や手入れの不備
(本体内部に砂やホコリ、液体など異物混入)による故障および損傷。
- 本製品以外の原因で生じた故障および損傷。
- 本書の提示がない場合または未記入、改ざんが認められた場合。
- ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示がない場合。

サポート

弊社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万一ご不便やご不都合などお気づきの点があり
ましたらお客様相談サポートセンターへご連絡ください。

お客様相談サポートセンター:miraion@miraion.jp

※画像はイメージです。実物とデザイン、色など異なる場合がございます。
※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。

サポート依頼の流れ ※返送時の送料

**製品に不具合が生じた場合、ご購入の店舗または弊社お客様相談サポートセンターへ
お問い合わせください。**

- 初期不良の疑いがある場合、弊社お客様相談サポートセンターへメール(miraion@miraion.jp)でご連絡ください。
- 弊社お客様相談サポートセンターで内容を確認したら、ご返送方法をご案内いたします。
- 確認のため依頼品をお預りし、症状を確認したら速やかに交換対応させていただきます。

※返送時の送料

【購入日から2週間以上】お客様の元払いでお送りください。

【購入日から2週間以内】指定便(日本郵便 ゆうパック)の着払いでお送りください。

指定便以外はおお客様の元払いでお送りください。

※【ご注意!】下記①②③に該当する場合、受け入れをお断りする場合がございますので
あらかじめご了承ください。

- ① 事前に連絡のない依頼品
- ② 指定業者以外の着払い
- ③ 初期不良期間を過ぎている依頼品の着払い