


miraiON

ワイヤレスカメラ付き電子耳かき



取扱説明書 & 保証書

9. イヤープラグは外耳道の深さに合わせて調整可能です。
深く入れてしまい傷つけることを防ぎます。

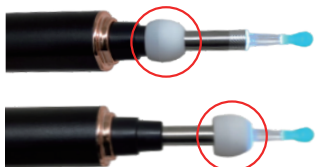

10. 子供の耳掃除をする場合、必ず保護者同伴で
ご使用ください。怪我や事故など危険な恐れがあります。



11. イヤースプーンは、大人や子供、ペットの耳掃除に
適した3.5mmの使いやすい大きさです。



付属品



使用方法

1. スマホでQRコードを読み取って「Walfront」
のアプリをインストールしてください。




iOS



Android


製品サイズ

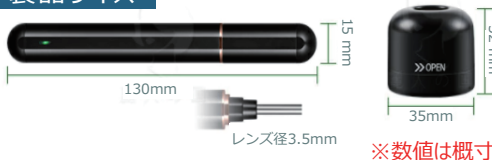

※数値は概寸

仕 様	
本体サイズ	1.5 x 13cm
台座サイズ	3.5 x 3.2cm
レンズ径	3.5 mm
ベストフォーカス位置	1.3~1.8 cm
本体重量	26g
バッテリー	300mAh リチウムバッテリー
画素数	300万
ランプビーズ	LEDランプ6個
防水	IP67
本体素材	アルミニウム合金
本体充電時間	60分間
作動時間	60分間
ジャイロ	6軸
作業できる温度	-10~50℃
対応OS	iOS and Android
フレームレート	25fps
映像素子	CMOS
入力電流	DC 5V 300mA

2. カバー外せば電源ONになります。

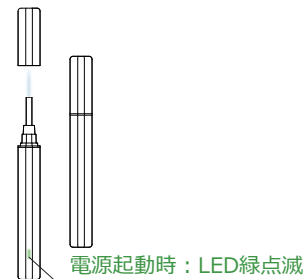

電源起動時：LED緑点滅

3. 使用時、イヤースプーンをネジのように回転してしっかり
固定したことを確認してご使用ください。



回転式デザイン

4. スマホと本機をWi-Fiで接続してください。



Wi-Fi接続時：LED緑点灯

よくある質問と解決方法

起動しても反応しない	もう1度説明書を読んでお試しください。 付属ケーブルで約1時間充電してください。 カバーを被せてもう1度外して電源の再起動。
アプリエラー	アプリをアンインストールで削除してから、 再度インストールしてください。
ランプの点滅	電力不足です。 付属ケーブルで約1時間充電してください。
ペアリングしても動かない (フリーズ、反応しない)	接続したペアリングを解除してから、再度接続 してください（電波状況の良い場所で使用）
接続が途切れてしまう	本体を再起動し、再度ペアリングしてください。

注意事項

- 本製品を使用する前に、必ずスコープをしっかりと付けてください。
- レンズを清掃したい場合、付属のアルコール綿棒で清掃してくださ
い。
- 本製品を使用する前に、周囲は走っている人がいないように確認し
てください。
- 本製品を6歳以下の子供に使用させないでください。
- 障害を防止するため、子供自身で使用させないでください。
- バッテリーの劣化を防止するため、使わない時にも、せめて1ヶ月
間1回充電してください。
- 本製品を日光直射の場所に置かないでください。
- 本製品を使う際に、多少温度が上がりますが（35℃以下）、ご安
心して使ってください。
- 本製品のレンズにはジャイロを使っていますので、耳掃除する際
に本体を水平にして使ってください。

5. アプリ画面で「始める」をクリックしてください。




6. アプリで映像を見ながら耳掃除してください。



7. 誤操作防止のため、スマホ画面の操作をロックできます。



8. 電池が少ない

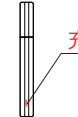

充電不足の状態：LED赤
充電中：赤点灯
充電終了：赤消灯

注意：iPhoneとペアリングする場合、画面に
Wi-Fiマークは表示されません。

※5V/1A出力対応「USBチャージャー」を別途ご用意ください。
※PDチャージャ対応しません。

製品保証について

この取扱説明書には事故防止のため重要な注意事項と取扱方法を記載して
おりますので、よくお読みいただき製品を安全にご使用ください。

本製品の故障または使用、使用不可によって生じたあらゆる障害は直接的、
間接的に問わず当社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

- ・本製品の異常な動作や外観に変形、破損、発熱など異常がある場合は、
直ちに使用を中止してください。
- ・直射日光、高温多湿、結露、砂、ホコリ、液体などの影響を受ける環境での
保管を絶対に行わないでください。
- ・子供だけの使用、幼児の手に届く場所に保管など、怪我など危険です。
必ず保護者同伴でご使用を行ってください。
- ・火気に絶対に近づけないでください。水に濡れたり、火の中に入れたりする
行為は絶対に行わないでください。
- ・落下や強い衝撃を与えないでください。
- ・5V/1A仕様のUSB充電器を推奨しております。製造元が不明なものや
仕様適合外のものを使わないでください。
- ・分解・修理・改造を絶対に行わないでください。
- ・使用前に必ず動作や異常がない事を確認のうえご使用ください。
- ・安全のため、充電中のご使用は行わないでください。

◎ 保証対応とサポートサービスについて
保証期間は新品購入日から3ヶ月です。
ご購入店と購入日を証明できるシートや画面キャプチャが必要になりますので
大切に保管を行ってください。

- ◎ 保証対象外
- ・注意事項に記載された内容に適合する場合
- ・ご購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障および損傷。
- ・本製品以外の原因で生じた故障および損傷
- ・本書の提示が無い場合又は未記入、改ざんが認められた場合
- ・ご購入日を証明できるシートなどの証明書の提示が無い場合

当社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、
万一ご不便やご都合などお気づきの点がありましたらサポート宛てに
メールでご連絡ください。 お問い合わせ：miraion@miraion.jp