


温度はかろう前後シリーズ クイックガイド

MR-NCQ3P-WH
MR-NCQ3P-SET

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
クイックガイドをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

付属品

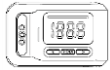

① 本体



② ボールヘッド



③ ハンドルバーマウント



④ USB ケーブル

長さ 約2m

(USB-A↔microUSB)



⑤ 三脚


※⑤三脚セットのみ付属



⑥ クイックガイド

※家庭用コンセントに接続するUSB チャージャーは付属していません。
USB 接続でご利用の場合、5V1A 出力対応品をご用意ください。

各部名称

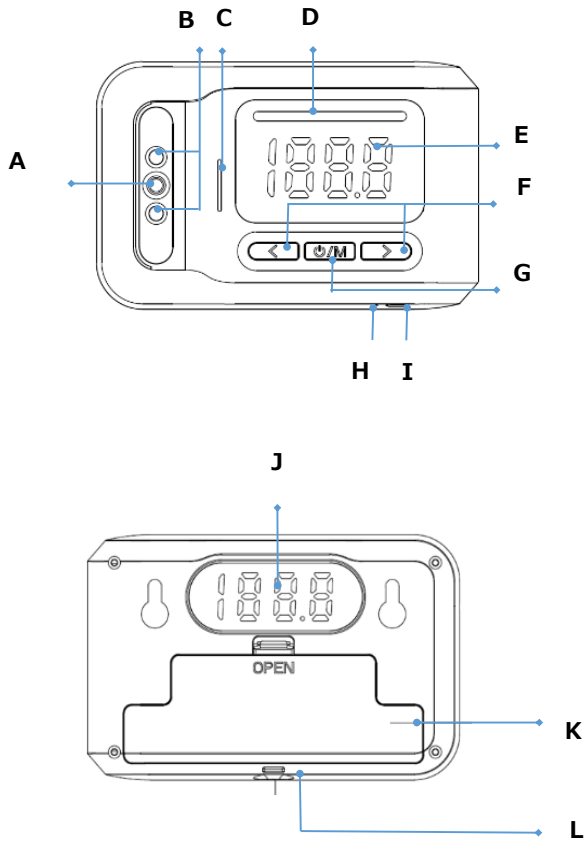

A	赤外線温度センサー
B	距離センサー
C	スピーカー
D	LEDランプ
E	モニター(前)
F	ボタン(<>)
G	電源/設定ボタン
H	USB電源ランプ
I	USB給電(microUSB)
J	モニター(後)
K	電池カバー
L	三脚取付穴

動画

使用方法動画
こちらをご覧ください

https://youtu.be/Dsyij_pQlwE

非接触温度測定 デュアルモニター
温度はかろう前後



給電方法

おすすめ!

コスト
軽減!

1 動作確認&USB給電



※5V/1A出力対応「USBチャージャー」をご用意ください。

1) USBの方向に注意して取り付け



2) 動作を確認



2 乾電池給電 ※短時間のみ利用可 単三電池×3(別売)

1) 電池の向きに注意して単三電池を3本セットする



2) 動作確認



使用しないでください。

※乾電池とUSBケーブルの併用せず、どちらかを選んでご利用ください。
※アルカリ乾電池（単三形）をおすすめします。

取り付け

1 手すり設置方法 ※三脚セットには付属していません

1) ナットを外す



2) ポールに設置



3) ナットを締める



4) ②ボールヘッドを取り付け



5) 本体を取り付け



6) 角度調整



2 三脚設置方法 ※⑤三脚セットのみ付属

1) ④本体に⑤三脚の取り付け



2) ⑤三脚を開く




3) 高さ調整



測定方法

1 おでこで測定

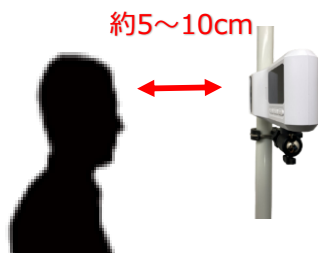

2 手のひらで測定



※距離が離れている場合、うまく測定できない場合があります。

S

温度警告

表示		温度	音声設定オンの時 音声警告	音声設定オフの時 ビープ警告	ランプ
正常	36.4	32.0～37.4℃	「体温は正常です」	1回	緑
高温	38.0	37.5～42℃	「ビービー」5秒	「ビービー」5秒	赤
再測定	Lo	32℃以下	「再測定してください」	1回	赤
再測定	HI	42℃以上	「再測定してください」	1回	赤

※アラーム警告温度 36 ～ 38℃の間で調整可能です、0.1℃間隔で設定可能です。

各種機能

日本国内で利用される場合には、下記設定でご利用いただけますでしょうか。


- 1 言語（音声）：JP（または測定者に合わせて変更ください）
- 2 表示単位選択：摂氏℃
- 3 音声設定：Vol.1
- 4 測定モード：bod
- 5 警告温度設定：37.5℃（警告する温度を設定してください）
- 6 自動電源オフ：A 1
- 7 低温表示設定：nor
- 8 測定音設定：（ご使用される環境に合わせた音源をお選びください）
- 9 警告音：（ご使用される環境に合わせた音源をお選びください）

1


言語 (音声)

初期設定 : ビープ音


(15 か国語/ビープ音/ オフへ変更)

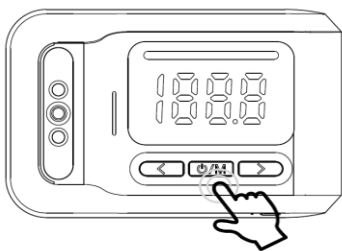


Gボタン1回押して言語 (音声) 設定メニュー

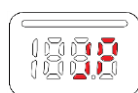


日本語

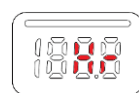


韓国語

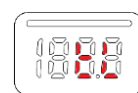


タイ語

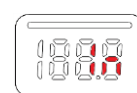


インド語

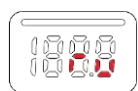


ロシア語

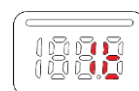


イタリア語

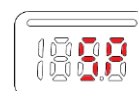


スペイン語

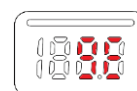


ドイツ語

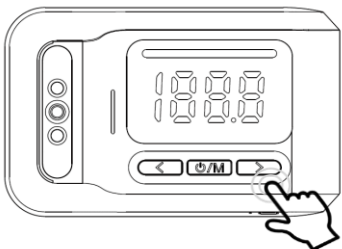


Fボタンを押して選択

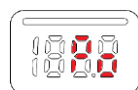


ポルトガル語

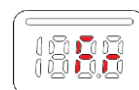


フランス語

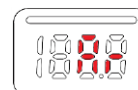


アラビア語

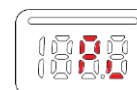


ポーランド語

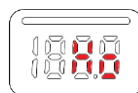


オランダ語

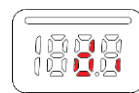

ビープ音

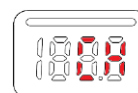

中国語

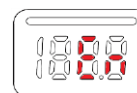


英語

2


表示単位選択

初期設定 : 摂氏℃


(摂氏℃、華氏°F)

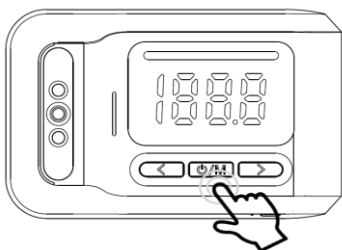


Gボタン2回押して表示単位設定メニュー

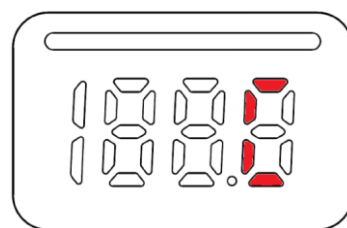

摂氏℃

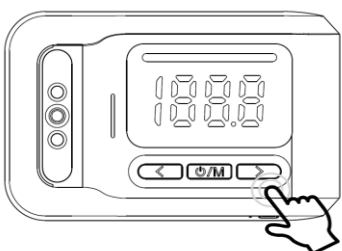

Fボタンを押して選択

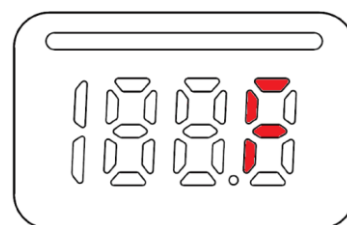


華氏°F

3


音量設定

初期設定：Vo1


(5段階で音量を調整)

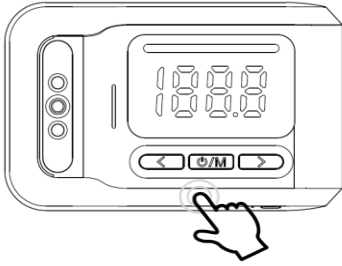


Gボタン3回押して音量設定メニュー

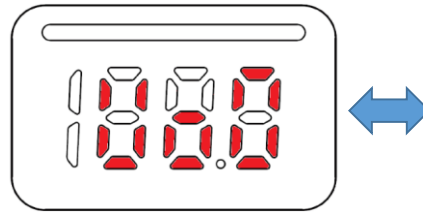

Vo0

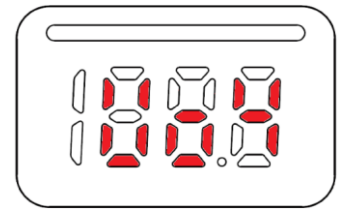

Vo4

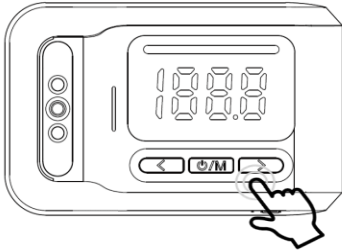


Fボタンを押して選択

4


測定モード選択

初期設定：bod


(温度測定、広範囲測定、回数)

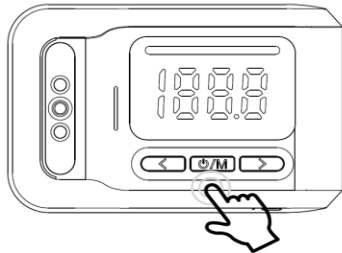


Gボタン4回押して測定モード設定メニュー

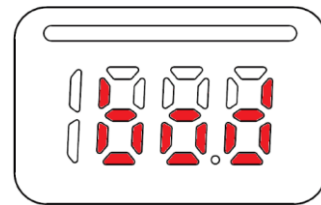


温度測定

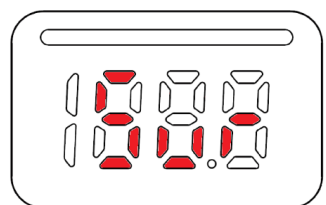

広範囲測定

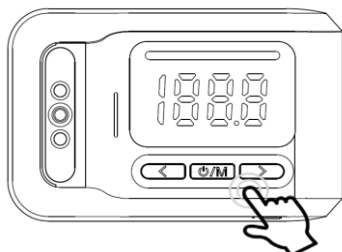

Fボタンを押して選択

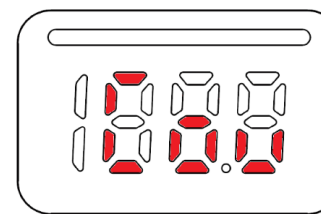

使用回数カウント

※使用回数カウント

温度測定できません

使用された回数を最大999回までカウントできる機能です。

電源オフになるとリセットされます。


リセットしたい場合は、USBケーブルの端子を外してください。

乾電池の使用時は、電池ボックスから乾電池を外せばリセットされます。


5

警告温度設定


初期設定 : 37.5℃

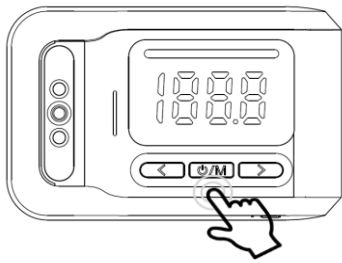

Gボタン5回押して警告温度設定メニュー

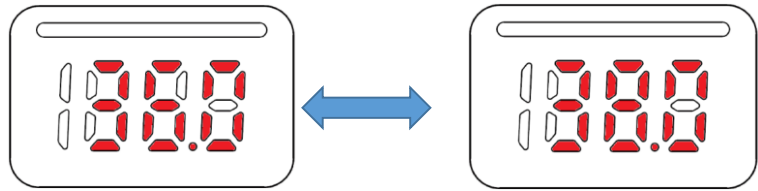

警告を出す温度を設定します。
 設定温度以上を検知するとアラームがなります。
 警告温度（設定範囲）36～38℃、0.1℃間隔で設定可能です。

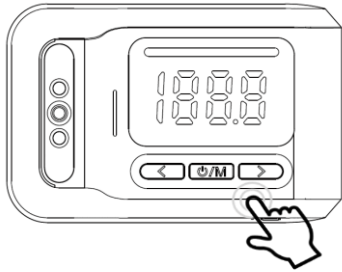


Fボタンを押して選択


6

自動電源オフ


初期設定 : A1

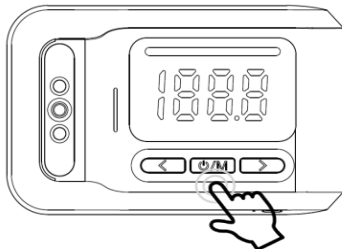


Gボタン6回押して自動電源オフ設定メニュー

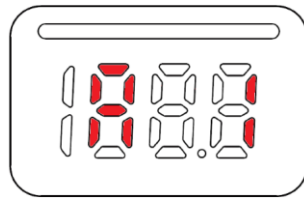



A1 : 使用開始から、12時間後電源オフ

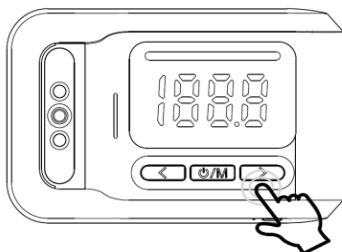

Fボタンを押して選択


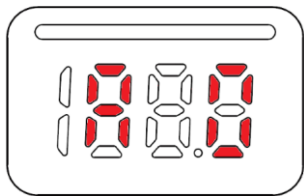


A0 : 自動電源オフしない

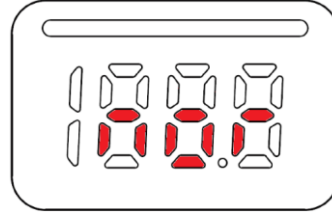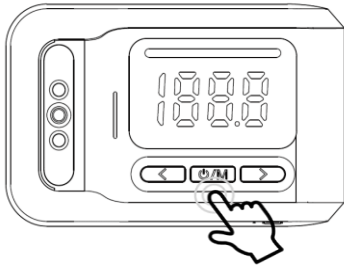**低温表示モード**


動作温度範囲：-20℃～45℃
低温環境での測定が可能です。
温度測定時、32℃以下場合
Loで表示します。

Gボタン7回押して低温表示設定メニュー

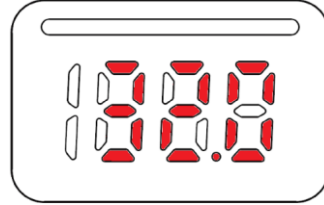
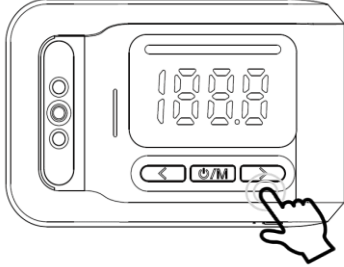
**32.0モード**

動作温度範囲：10℃～40℃
温度測定時、32℃以下場合
ずっと32℃で表示します。

Fボタンを押して選択


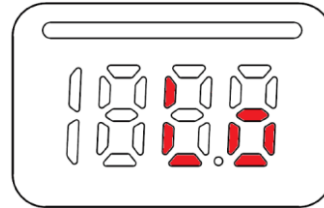
**Loモード**

動作温度範囲：10℃～40℃
温度測定時、32℃以下場合
Loで表示します。

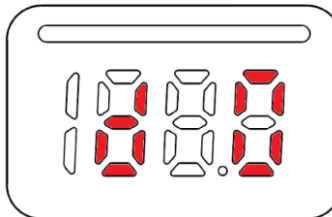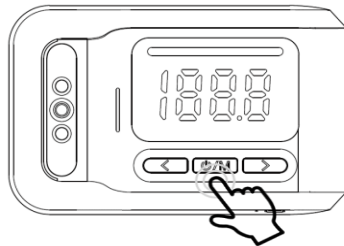


d0：ピンポン

Gボタン8回押して測定音設定メニュー

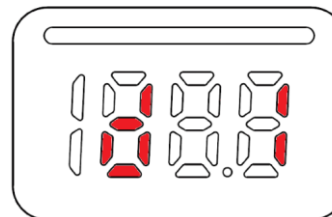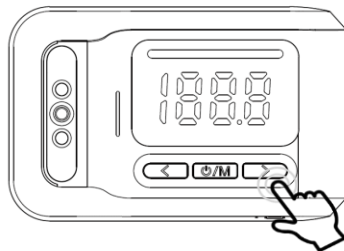


d1：ビーブ音


Fボタンを押して選択

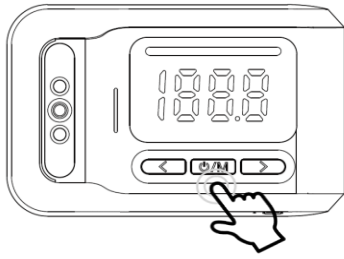


Gボタン8回押して警告音設定メニュー

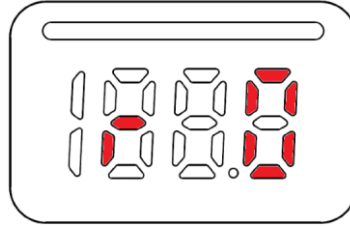

r0：ビープ音5秒

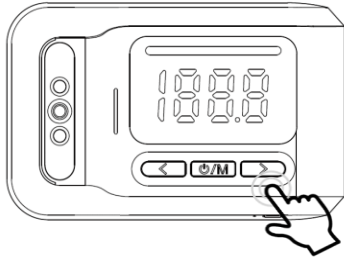


Fボタンを押して選択

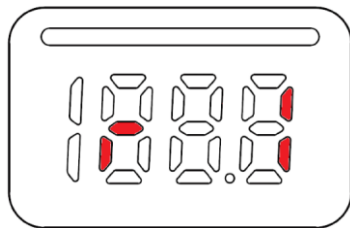

r1：アラーム

温度履歴

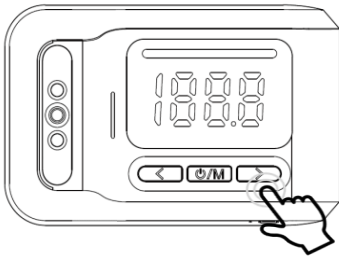

Fボタンを押して最新記録を確認
(32回分、測定温度のみ)

Fボタンを押して選択

製品仕様

商品名	温度はかるう前後シリーズ
測定方式	赤外線
表示単位	0.1℃
入力電圧電流	5V/1A
アラーム方式	異常自動警報+ アラーム音+ 音声案内
設置方法	ポート設置、三脚スタンド
温度測定部位	手のひら、おでこ
測定範囲	0 ~ 50℃
測定精度	± 0.2℃
測定距離	約5 ~ 10cm
温度の単位	摂氏・華氏
使用環境温湿度	10 ~ 40℃/≤85%RH
ケーブル	USB ケーブル (USB-A←→microUSB) ※5V1A出力対応のUSBチャージャーをご用意ください。
本体寸法	約138×88×59.5mm
本体質量	約135g

よくあるご質問

不具合の疑いのある場合、まずは「動作確認」を行っていただけますでしょうか。

動作確認 1. 電力不足

乾電池の電力が不足すると、製品の動作は不安定になります。
新しい乾電池と交換してください。

動作確認2. 動作温度（本体が冷え過ぎたり、熱くなりすぎた状態）
本体自体が冷えすぎたり、熱くなりすぎると、うまく動作しなかったり、動作が不安定になります。15～30℃の室内で温度を慣らして、動作温度範囲の状態にしてからご使用ください。

注意事項

ご使用前に、必ず注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項を守らずに使用した場合や、製造業者以外が修理、改造、再調整した場合、発生した事故に対しての一切の責任を負いかねます。

※乾電池とUSBケーブル併用はしないでください。
※本機は表面温度を測定する製品です。医療用の温度計ではありません。
※本製品は防水仕様設計ではありません。
以下の場合には正しい温度を表示できない場合があるためご注意ください。

<測定時のご注意>

- エアコンや暖房の近くなど風の当たる場所で測定した場合。
 - 直射日光など環境により温まっている場合。
 - 汗などでおでこや手のひらが濡れている場合
 - 測定する場所とは異なる温度差のある場所にいた場合。
 - 測定の妨げになるものがセンサーの間にある場合。
 - 指定の使用温度、湿度範囲外で使用しない。
- 上記の場合、正しい測定精度を保証できません。

■ 測定について

- 温度測定は手のひらで行ってください。
- 手のひらかおでこ以外の場所で測定すると正確に測定できない場合があります。

■ 取扱いについて

- お子様だけの使用や、幼児の手の届く所に保管しないでください。ケガの恐れがあります。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 分解・修理・改造を行わないでください。故障や誤作動の原因になります。
- 本体に動作に異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本製品を廃棄する場合は、各自治体の規則に従い適切に処分する。

※注意：画像はイメージです。実物とデザイン、色など異なる場合がございます。
※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。
これは欠品ではありませんので予めご了承ください。

保証規定

- **保証期間は新品購入日から3ヶ月です。**
- サポートサービスは「ご購入日を確認できるレシートや購入証明書」が必要です。大切に保管してください。
- 転売品など所有権譲渡品、中古売買品は理由を問わず保証対象外となります。
- 保証期間内にクイックガイドの注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に無償対応いたします。
- 本製品の保証は日本国内のみ有効です。The warranty of this product is valid only in Japan.
- 点検依頼中の代替品の貸出は行っておりません。
- 以下の場合には保証対象外になります。
 1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障および損傷。
 2. ご購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障および損傷。
 3. 当社の指定サービス機関以外で行われた修理、改造、分解による故障および損傷。
 4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害（自然災害を含む）、結露、環境要因に起因する電圧の変化など。
 5. 保管の不備（高温多湿、防虫剤や有害薬品など影響下の保管等）や手入れの不備（本体内部に砂やほこり、液体など異物混入）による故障および損傷。
 6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷。
 7. 本書の提示が無い場合又は未記入、改ざんが認められた場合。
 8. 付属品や消耗品類の交換。
 9. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示が無い場合。
- 不具合の疑いがある場合（点検、初期不良）
- 不具合の疑いがある場合、弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご依頼にあたり、お客様のご連絡先、故障状況など明記の上、ご購入日を確認できるレシートなどを添付してメールをお送りください。
- **製品の初期不良期間は購入日から2週間以内です。**そのため、ご購入後速やかに動作確認をお願いいたします。

■ 返送時の送料について

1) 初期不良扱い（購入後2週間以内）

「日本郵便 ゆうパック」着払い、または他の運送業者をご利用される場合は元払いで発送してください。

2) 修理点検扱い（購入後2週間以上）

お客様の元払いにてお送りください。

※ 下記に該当する場合、受け取りをお断りする場合がございますので予めご了承ください。

- ・事前に連絡ない場合。
- ・指定業者以外での着払い。
- ・初期不良扱いを過ぎている場合の着払い。

サポート

当社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万一ご不便やご不都合などお気づきの点がありましたらサポート宛てにメールでご連絡ください。

お問い合わせ： miraion@miraion.jp

販売元：ミスターカード株式会社

20220216