

# 温度はかるくん スタンドセット ジェル専用

## クイックガイド

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。  
クイックガイドをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

### 1. 付属品



※家庭用コンセントに接続する USB チャージャーは付属しておりません。  
別途、5V/1A 出力対応の「USB チャージャー」をご用意ください。

### 2. 各部説明



部位	名称
①	キャップ
②	モニター
③	赤外線温度センサー
④	消毒液出口
⑤	距離センサー※
⑥	三脚取付穴
⑦	消毒液残量確認ゲージ
⑧	電源ボタン
⑨	摂氏 (°C)/ 華氏 (°F) 表示切替
⑩	USB 給電

※距離センサーについて

- ・本体下側から約 15cm 以内に物を置かないでください。
- ・手のひらを検知する感度センサーは「黒以外の色」に反応するため、アルコールジェルを連続噴射してしまう場合があります。

### 3. 設置方法

本体は「壁掛け」、「スタンド」で設置可能です。

壁掛け




③ 金具での設置

スタンド



### 4. ご使用前の準備

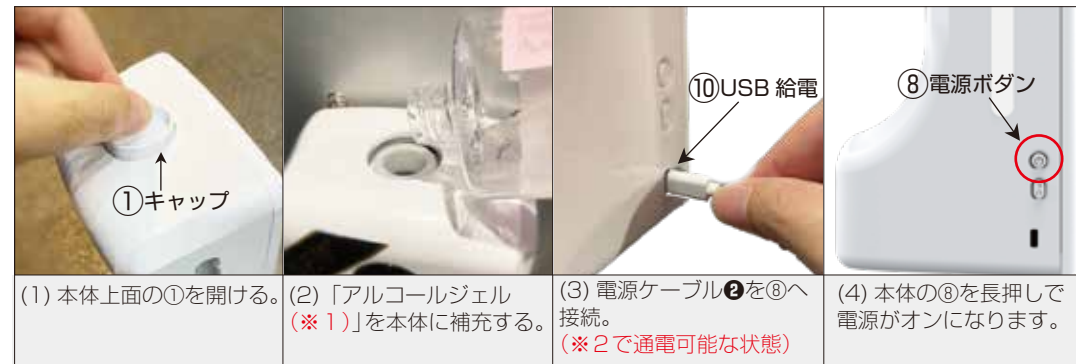

- ※ 1. 本製品はアルコールジェル専用商品です。  
補充は市販されている「消毒ジェルタイプ」をご用意ください。  
粘度が高いジェルは本体内部で詰まる場合があります。  
ジェルの種類を変えるか、市販のアルコール液と混ぜてご使用ください。
- ※ 2. 別途ご用意いただきました USB チャージャーを接続した状態。

### 5. 使用方法



表示		温度	アラーム回数
正常	36.2	35.1～37.3℃	1回
高温	38.0	37.4～42℃	10回
再測定	Lo	35℃以下	2回
再測定	Hi	42℃以上	2回

## 6. 各種機能

### 温度表示の切り替え

⑧のボタンを押して、℃/℉の表示を変更できます。※日本の測定単位は摂氏（℃）



## 7. 製品仕様

商品名	温度はかるくん ジェル専用
型番	MR-NCAT-AG
測定方式	赤外線
表示単位	0.1℃
入力電圧電流	5V/1A
ボトル容量	1000ml
アラーム方式	異常自動警報＋ピープ音
設置方法	壁掛け、スタンド（別売）
温度測定部位	手のひら
測定範囲	35～42℃
測定精度	± 0.2℃
測定距離	約 5～10cm
温度の単位	摂氏・華氏 切替可
使用環境温湿度	10.0～40.0℃/≦85%RH
ケーブル	USB ケーブル (USB-A↔USB Type-C) ※5V1A 出力対応の USB チャージャーをご用意ください。
本体寸法	約 119×280×133 cm
本体質量	約 700g



## 8. よくあるご質問

**Q：表面温度が低く表示される。**

A：動作できない温度になっていないか

本製品の使用環境温湿度は「10.0～40.0℃/≦85%RH」です。気温が低い時期や屋外、一晩中冷え切った状態の早朝など、本体が正常に動作できない温度になるため正常に計測できない場合がございます。動作可能な温度に戻るまで、しばらく時間をおいて整えてから再度ご確認くださいませうか。

**Q：アルコール以外の消毒液使用について**

A：温度はかるシリーズはアルコール専用のモデルです。

「温度はかるくん ジェル専用モデル」では、アルコール液体消毒液はご利用できません。「温度はかるちゃん 液体専用モデル」では、アルコールジェル消毒液はご利用できません。

尚、温度はかるシリーズはアルコール専用のため、次亜塩素酸などの他の消毒液はご使用になれません。本体機器が故障してしまいます。

**Q：消毒液が連続で噴射してしまう**

A：色、物体との距離に反応する場合がございます。本体下側の感度センサーは黒以外の色がある場合や下側から約15cm以内に物体がある場合に反応し続けます。そのため、本体下側には黒色の受け皿、物体を15cm以上の離れた状態でご利用ください。尚、卓上式スタンド利用時は付属の黒色トレイを必ずご利用いただけますようか。

## 9. 使用上のご注意

ご使用前に、必ず 注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項を守らずに使用した場合や、製造業者以外が修理、改造、再調整した場合、発生した事故に対しての一切の責任を負いかねます。

- ※本製品はアルコールジェル専用商品です。消毒液は必ず「ジェルタイプ」をご使用ください。
- ※粘度が高いジェルは本体内部で詰まる場合があります。ジェルの種類を変えるか、市販のアルコール液と混ぜるなどお客様の判断でご使用ください。
- ※本製品はアルコール消毒用のディスペンサーですので火気を絶対に近づけないでください。
- ※乾燥など環境によってノズルの先に詰まるおそれがあります。ノズルの先に触れないよう、数回ジェル噴射を行ってください。
- ※長時間使用しないとノズルの先に詰まることがあります。目に見えて固まりがある場合、先に細い物などで固まりを取り除いてください。
- ※本機は表面温度を測定する製品です。医療用の温度計ではありません。

以下の場合には正しい温度を表示できない場合があるためご注意ください。

＜測定時のご注意：本体、手のひら＞

- ・エアコンや暖房の近くなど風の当たる場所で測定した場合。
  - ・直射日光など環境により温まっている場合。
  - ・汗などで濡れている場合（手のひら）
  - ・測定する場所とは異なる温度差のある場所にいた場合。
  - ・測定の妨げになるものがセンサーの間にある場合。
  - ・指定の使用温度、湿度範囲外で使用しない。
- 上記の場合、正しい測定精度を保証できません。

■測定について

- ・体温測定は手の平で行ってください。
- ・手のひら以外の場所で測定すると正確に測定できない場合があります。

■取扱いについて

- ・お子様だけの使用や、幼児の手の届く所に保管しないでください。ケガの恐れがあります。
- ・落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ・分解・修理・改造を行わないでください。故障や誤作動の原因になります。
- ・本体に動作に異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・本製品を廃棄する場合は、各自治体の規則に従い適切に処分する。
- ・本製品は防水仕様設計ではありません。

## 10. 保証規定

- ・保証期間は新品購入日から3ヶ月です。転売品など所有権譲渡品、中古売買品は理由を問わず保証対象外となります。
- ・保証期間内のサポートサービスには「ご購入日を確認できるレシートなどの証明書」が必要のため大切に保管してください。
- ・保証期間内にクイックガイドの注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に無償対応いたします。
- ・本製品の保証は日本国内のみ有効です。The warranty of this product is valid only in Japan.
- ・点検依頼中の代替品の貸出は行っておりません。

・以下の場合には保証対象外になります。

1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障および損傷
2. ご購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障および損傷
3. 当社の指定サービス機関以外で行われた修理、改造、分解による故障および損傷
4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害によるもの（自然災害を含む）、結露、環境要因に起因する電圧の変化など
5. 保管の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等）や手入れの不備（本体内部に砂やほこり、液体など異物混入）による故障および損傷
6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷
7. 本書の提示が無い場合又は未記入、改ざんがに止められた場合
8. 付属品や消耗品類の交換
9. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示が無い場合

## 11. サポート

■初期不良について

- ・製品の初期不良期間は購入日から2週間以内です。そのため、ご購入後速やかに動作確認をお願いいたします。
- ・不具合の疑いやおかしいと思ったら、依頼品発送前にサポートセンターへお問い合わせいただけますようか。

■返送時の送料について

- 1) 初期不良扱い（購入後2週間以内）  
「日本郵便ゆうパック」着払いにてお送りください。  
別の運送業者の場合は、元払いで発送ください。

- 2) 修理点検扱い（購入後2週間以上）  
元払いにてお送りください。

※下記に該当する場合、受け取りをお断りする場合がございますので予めご了承ください。

- ・事前連絡がない場合
- ・指定業者以外での着払い
- ・初期不良扱いを過ぎている場合の着払い

ご使用法について、万一ご不明な点や不具合などお気づきの点がありましたら、サポート宛てにメールでご連絡ください。  
お問い合わせ：[miraion@miraion.jp](mailto:miraion@miraion.jp)