

必ずお読みいただき、ご使用いただけますでしょうか。

📖 最新版クイックガイド、使い方はウェブサイトをご確認ください

◎QRコード

◎インターネットで検索



温度はかる先生

! 消毒液漏れによる故障は保証対象外となります。

消毒液があふれる・こぼす



斜めにしない。倒さない。



破損

基盤、反応センサーが
浸水で破損します




※基盤やセンサーが濡れた状態で、電源を入れて通電するとショートして壊れる可能性があります。
消毒液に濡れてしまった場合、自然乾燥で2日間ほど乾かした状態で復旧する場合もございます。

! 本体や乾電池が冷えるとうまく動きません。

夜中に冷えてしまい、「動かない」「動作不安定」など症状



確認

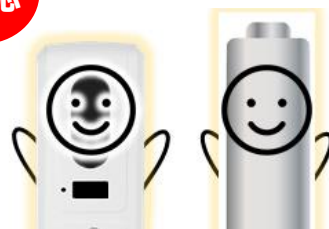

15~30℃の室内の温度で、
30分ほど温度を慣らしてください。

! 電力不足、電池交換の注意点

電力不足の場合、症状発生


- ・動作が不安定
- ・動作、反応しない
- ・噴射しない、噴射遅い
- ・測定温度が低い、高い
- ・音が途中で切れてしまう

電池

下記は使用時間が短くなります。
△ 乾電池の品質、グレード
△ 乾電池が冷えるとパフォーマンス低下
△ 使用回数
△ 使用済みの電池が混じっている場合
必ず、4本すべてを交換してください。

確認


すべての乾電池を
新品交換してください。

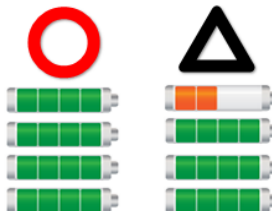

長持ちするアルカリ電池を推奨！

⚠ 使用時の注意点


測定位置

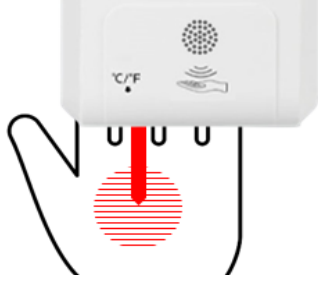

℃/ℱ マークを目印として、
検温を行ってください。



反応するセンサーの位置は、
画像の丸部分です。

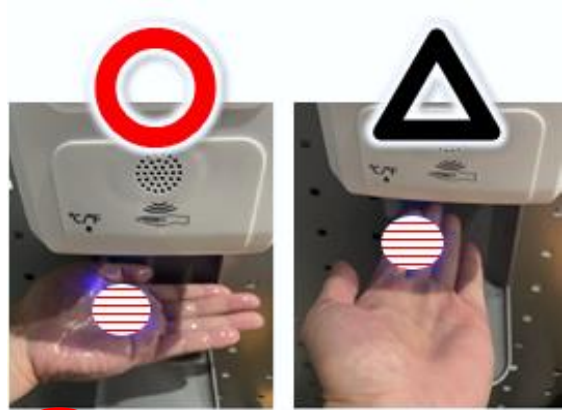

確認


左側から手を入れると
手のひら中央で検温できます！

消毒液のトレイ利用ご注意



アルコール噴射でトレイがあふれる場合、
黒色のスポンジなどを置いて対処してください。
尚、約15cm以内の異物に反応するためご注意ください。

スピーカーのズレ

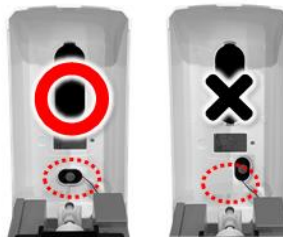


音声が小さすぎる場合、
スピーカー位置を確認ください。

下記には対応していません


噴射量の調整



電源アダプター

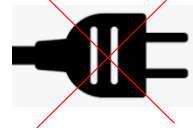

音量調整

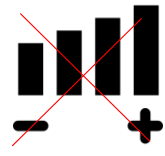

消毒ジェル



開閉時はクリップを利用



補充時はじょうごのご利用



オリジナル
サービス

存在をアピールしましょう

⚠ 電源リセット

確認

すべての電池をはずしてから、5秒待って入れ直してください。



サポート・点検依頼はこちらにお問い合わせください。

◎ メールアドレス miraion@miraion.co.jp

◎ 必要な情報

①購入日、購入先 ②商品名（型番） ③不具合内容 ④お客様側で確認いただいた内容